

Perma Evolution Instrukcja użytkowania

Skład:

Pasta 1: 4-[2 - (4-hydroksy-fenyl) propan-2-yl] fenolu -żywicy epoksydowej
Alkilo-glicydowy eter
Siarczan baru
Fosforan trójwapniowy
Bisfenol A

Pasta 2: Kopolymer -Polyalkoxyalkylamina

5 – amnio- 1,3,3-diamina trimetylo heksametylenu

wodorochlorek poliheksametylen Bigadyniny, nanocząsteczki dwutlenku krzemu

woda, siarczan baru, fosforan trójwapniowy

Właściwości:

Perma Evolution jest materiałem trwałym, wolnym od paraformaldehydów, służącym do wypełniania i uszczelniania kanałów korzeniowych opartych na bazie znanych żywic amino epoksydowych.

Materiał zawiera środek dezynfekcyjny, co zapobiega reinfekcji kanałów korzeniowych

Jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim.

Dzięki zawarty nanokapsułkom jest stabilny i samonaprawiający się.

Materiał nie jest narażony na reabsorpcję

Jest łatwy w użyciu podczas procedury zwykle stosowanej przy opracowywaniu kanałów.

Materiał spełnia warunki stawiane przez normę ISO 6876:2001

Perma Evolution nie jest zalecana do techniki wypełniania wstecznego.

Stosowanie:

Po opracowaniu kanału korzeniowego z zastosowaniem standardowych metod oraz jeśli to konieczne po zabezpieczeniu go przy pomocy tymczasowych wypełniaczy (np. Asphaliner term), należy wypełnić kanał gutaperką lub srebrnym, tytanowym ćwiekiem.

Przed użyciem Permy Evolutoin należy odkręcić korek zamykający podwójny tłoczek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dołączone do strzykawki kaniule mocowane są poprzez dokręcenie, pozwalają na bezpośrednią aplikację past. Przez jednoczesne naciskanie obu tubek gotowe do wprowadzenia pasty są mieszane w dołączonych kaniulach w stosunku 1:1. Pasty można mieszać na bloczku z użyciem lentula lub gutaperki.

Alternatywnie można wprowadzić materiał bezpośrednio do ujścia kanału przy pomocy endotipsów również dołączonych do opakowania.

Po zakończeniu dozowania należy kaniulę wyrzucić a strzykawkę starannie zamknąć.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia używane i bloczki natychmiast po użyciu wyczyścić w 50% roztworze etanolu i wody z odrobiną detergentu.

Czas opracowywania:

Pomieszane pasty mogą być opracowywane przez 15 minut. Czas opracowywania skraca się podczas

używania materiałów termicznych.

Przechowywanie:

Perma Evolution należy przechowywać w miejscu suchym i chłodnym. Temperatura bezpośrednio oddziałująca na materiał nie może przekraczać 30°C.

Po użyciu należy szczelnie zamknąć strzykawkę.

Otwarta tubka musi być zużyta w ciągu 6 miesięcy.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywanie po terminie przydatności do użycia powoduje ograniczenie skuteczności działania materiału.

Wskazówki i ostrzeżenia:

Materiał Perma Evolution nie może być stosowany u osób nadwrażliwych na żywice epoksydowe, aminy lub inne związki wchodzące w skład past.

Kontakt ze skórą lub oczami: Należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W razie wystąpienia bezpośredniego kontaktu z pastą należy miejsce kontaktu spłukać obficie wodą.

Kontakt z błoną śluzową:

Zaleca się unikanie kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej. Jeśli jednak do niego dojdzie należy jak najszybciej usunąć pastę.

Potem należy spłukać dane miejsce obficie wodą a następnie usunąć ją stosując ssak.

W razie dalszych objawów nadwrażliwości zaleca się kontakt z odpowiednim lekarzem specjalistą.

Połykanie: Nie wolno połykać pasty ani stosować produktu wewnętrznie.

Jeśli dojdzie do przypadkowego połykania resztek pasty rekomenduje się natychmiastowe wypicie dużej ilości wody. W przypadku utrzymywania się objawów nudności lub innych dolegliwości należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Producent: Alfred Becht GmbH
D -77601 Offenburg
Tel. 0781-605-860
www.becht-online.de

Importer: G.C.Z.S. Hurtodent
41-800 Zabrze
Tel. 032-2760403
www.hurtodent.neostrada.pl